

INFORMATIONEN ZUM ANTIGEN-SCHNELLTEST ("Nasenbohrertest")


Ab dem 08.02.2021 werden in der Schule jeweils am Montag und Mittwoch die Antigen-Schnelltests durchgeführt. Die Teilnahme beruht auf Freiwilligkeit und setzt bei Schüler*innen unter 14 Jahren das Einverständnis der Eltern voraus.

Schüler*innen, die in den letzten sechs Monaten an Covid-19 erkrankt waren, müssen an den Testungen nicht mehr teilnehmen, wenn sie die Erkrankung am Tag der Testung schriftlich (Attest, Befund) nachweisen können.


Schüler*innen, die am Test nicht teilnehmen dürfen oder wollen, ist es nicht gestattet, am Präsenzunterricht in der Schule teilzunehmen.

ABLAUF DES ANTIGEN-SCHNELLTESTS

- Schritt 1: Die Lehrerin / der Lehrer verteilen die Testkärtchen und die Stäbchen. Jede Schülerin / jeder Schüler erhält jeweils eine Karte und ein Stäbchen.
- Schritt 2: Die Schülerin / der Schüler schreiben den eigenen Namen gut lesbar auf die Außenseite des erhaltenen Testkärtchens.
- Schritt 3: Die Schülerin / der Schüler nimmt ihre / seine Maske ab und öffnet die Verpackung des Stäbchens.
- Schritt 4: Die Schülerin / der Schüler dreht das Stäbchen zuerst im rechten Nasenloch fünfmal, dann im linken Nasenloch fünfmal.

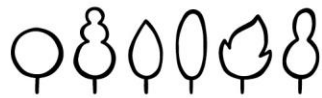

- Schritt 5: Die Schülerin / der Schüler steckt das Stäbchen ins Testkärtchen von B nach A und setzt danach die Maske wieder auf.
- Schritt 6: Die Lehrerin / der Lehrer geht durch die Klasse und tropft fünf Tropfen der Lösung in die Öffnung A. Die Lehrerin / der Lehrer trägt dabei Einweghandschuhe.
- Schritt 7: Die Schülerin / der Schüler dreht das Stäbchen zweimal nach rechts und zweimal nach links.
- Schritt 8: Die Schülerin / der Schüler zieht den Klebestreifen ab, klappt das Testkärtchen wieder zu, um es zusammenzukleben. Das Stäbchen bleibt im zusammengeklebten Testkärtchen stecken.
- Schritt 9: Die Schülerin / der Schüler muss nun ca. 15 Minuten auf das Ergebnis warten.
- Schritt 10: Nach 15 Minuten geht die Lehrerin / der Lehrer durch die Klasse und kontrolliert das Ergebnis auf der Vorderseite der Testkärtchen. Sollte es bei einer Schülerin / einem Schüler zu einem positiven Testergebnis kommen, vermerkt die Lehrerin / der Lehrer den Namen auf einer Liste und setzt alle weiteren Maßnahmen (Eltern werden kontaktiert und müssen die Schülerin / den Schüler abholen) in Gang.
- Schritt 11: Die Testkärtchen und Stäbchen werden in einen eigens zur Verfügung gestellten Müllsack geschmissen. Dieser Müllsack wird umgehend in einem eigens zur Verfügung gestellten Müllcontainer vor der Portiersloge entsorgt.

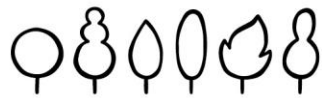

Schritt 12: Jede Schülerin / jeder Schüler desinfiziert den eigenen Tisch und die Hände. Desinfektionsmittel und Papierhandtücher werden von der Schule zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich werden die Fenster in der Klasse während und nach dem Test für einige Minuten geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten.

Sehen Sie sich bitte den kurzen Film an, der Ihnen einen Eindruck vermittelt, wie die Testung abläuft.

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8lj_ooU

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins zweite Semester. Scheuen Sie bitte nicht davor zurück, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Wir sind für Sie da!

MMag. Árpád Krämer
Direktor

Wien, 05.02.2021